

Plantilla de tallas y colocación

1. Imprima esta hoja.
2. Con unas tijeras, recorte las almohadillas por la línea de puntos. Su contorno se corresponde con su tamaño real.
3. La **almohadilla grande se considera la opción estándar**, y es idónea para las tallas de mascarilla mediana, grande y extra grande. La almohadilla pequeña es idónea para las tallas de mascarilla pequeña, extra pequeña y pediátrica.
4. Colóquese los recortes sobre la cara a fin de determinar la talla de almohadilla que debe usar. **Si está entre las dos, le recomendamos la talla grande.**



A modo orientativo, las alas de la almohadilla deben llegar a un punto situado entre las pupilas y las comisuras exteriores de los ojos, como se muestra arriba.

La almohadilla se puede colocar en distintos ángulos de forma que se adapte al contorno de los rasgos faciales del usuario.

Si selecciona la talla y coloca la almohadilla correctamente, aumentará la comodidad de la mascarilla.



Idónea para mascarillas
MEDIANAS, GRANDES y EXTRA GRANDES

Almohadilla grande

Anchura máxima: 10,7 cm Altura máxima: 5,1 cm



Idónea para mascarillas
PEQUEÑAS, EXTRA PEQUEÑAS y PEDIÁTRICAS

Almohadilla pequeña

Anchura máxima: 8,9 cm Altura máxima: 3,8 cm



Gecko™
NASAL PAD

© ResMed 2011 618197/1 2011-07